

מדריך לטיפול עצמי ב-

Flaminal Hydro-ו Flaminal Forte



מטופל/ת יקר/ה-

איש צוות רפואי רשם לך פלאמינל פורטה או פלאמינל הידרו לשימוש בבית. צירפנו עבורך מידע רלוונטי על התכשיר שקיבלת והנחיות לשימוש. יש לעקוב אחר ההוראות בהקפדה.

התוויות נגד:


אין להשתמש בתכשיר אם יש לך אלרגיה ידועה לאחד המרכיבים. אין למרוח על העפעפיים או על העין. במקרה של מגע עם העיניים יש לשטוף במים זורמים ולהתייעץ עם רופא.

יתרונות השימוש בפלאמינל שמבטיחים ריפוי מהיר: שומר על ניקיון הפצע. שומר על איזון הלחות בפצע ומאפשר תנאי ריפוי מיטביים. בטוח לרקמות של העור ושל הפצע. מגן על שולי הפצע, מקנה הגנה מפני חיידקים ומפחית ריח מהפצע.

אם יש לך שאלות הנוגעות לשימוש בפלאמינל, ניתן ליצור עמנו קשר במייל Info@cwt.org.il או בטלפון 072-397-1810. מידע נוסף ניתן למצוא באתר החברה www.cwt.org.il. אם יש לך שאלות הנוגעות לטיפול או לפצע שלך, אנו ממליצים לך לפנות לאחות או לרופא שלך.




שלב 3: חבישה

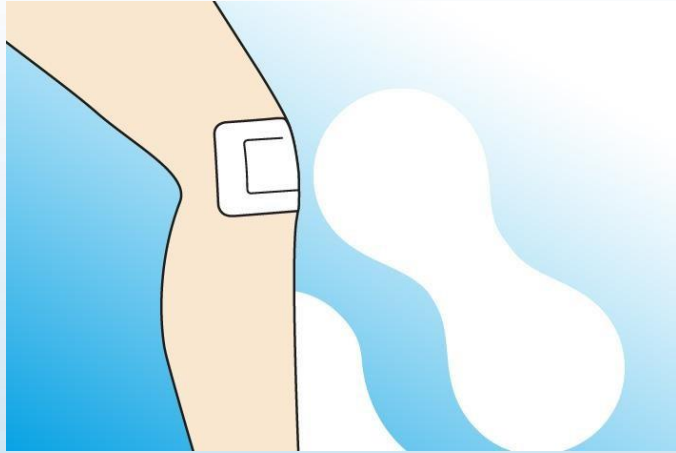

- יש לכסות את הפצע בהתאם להנחיות צוות רפואי.
- בחירת החבישה צריכה להתאים לסוג הפצע: פצע עם הפרשות מרובות- יש להשתמש בחבישה משנית סופגת.
- פצעים עם הפרשה מועטה ('יבשים' יותר)- להשתמש בחבישה משנית לא דביקה, אך אם הפצע החל להפריש, יש לחבוש מחדש עם חבישה סופגת.
- יש להחליף את החבישה כל 1 עד 4 ימים או בהתאם להמלצת הצוות הרפואי.*

שלב 2: טיפול

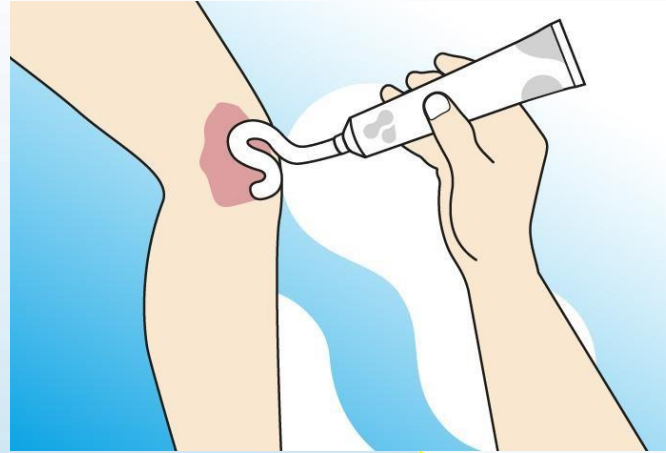

- לאחר ניקוי הפצע יש לכסות את כל משטח הפצע בשכבה עבה מספיק של פלאמינל, כ-0.5 ס"מ.
- ניתן להניח את הפלאמינל ישירות על הפצע או להשתמש במוליך אם סופק לך אחד כזה.
- יש להימנע ממגע ישיר בין שפופרת הפלאמינל או המוליך עם הפצע.

שלב 1: ניקוי



- לפני הנחת פלאמינל פורטה/הידרו יש לשטוף ידיים וליבשם.
- לאחר מכן, יש לנקות את הפצע ואת האזור שמסביב לו במים נקיים או במוצר לניקוי פצעים בהתאם ליעוץ שקיבלת מאיש הצוות הרפואי.
- במידה ונותרו שאריות פלאמינל משימוש קודם, שאינן נשטפו בקלות, זה בסדר להשאירן ולא לכסות להסירן.

***שימו לב:** מומלץ לבדוק את החבישה מדי יום. בימים הראשונים לטיפול מומלץ להחליף חבישה כל יום-יומיים ובהמשך להפחית את תדירות ההחלפה לכלל 3 - 4 ימים או בהתאם להמלצת הצוות הרפואי.

