

# مرشد للعلاج الذاتي للمرضى مع انايبب تغذية Flaminal Hydro- Flaminal Forte



مزايا استخدام فلامينال التي تتضمن:

- 1 سرعة الشفاء:  
يحافظ على الجرح نظيفا.  
يحافظ على توازن الرطوبة في الجرح ويسمح  
بظروف الشفاء المثلى.  
آمن للجلد وأنسجة الجرح.  
يحمي حافة الجرح ويوفر الحماية من البكتيريا  
ويقلل من الرائحة الكريهة من الجرح.

عزيزي المريض وصف لك أحد أعضاء الطاقم الطبي  
Flaminal Forte أو Flaminal Hydro للاستخدام  
المنزلي. لقد قمنا بتضمين المعلومات ذات الصلة حول  
الإعداد الذي تلقته وتعليمات الاستخدام. يجب اتباع  
التعليمات بعناية

موانع الاستعمال: 1  
لا تستخدم المنتج إذا كان لديك حساسية  
معروفة تجاه أحد المكونات. لا يوضع على  
الجفون أو العين. في حالة ملامسة العينين ،  
اشطفها على الفور بكمية كبيرة من الماء  
واطلب المشورة الطبية.

إذا كان لديك أي أسئلة بخصوص استخدام فلامينال يمكنك الاتصال [Info@cwt.org.il](mailto:Info@cwt.org.il)  
أو عن طريق الهاتف 072-397-1810 يمكن العثور على مزيد من المعلومات على موقع الشركة [www.cwt.org.il](http://www.cwt.org.il)  
إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص علاجك أو جرحك ، نوصيك بالاتصال بممرضتك أو طبيبك



## الخطوة الثالثة : التضميد



- يجب استخدام ضمادة ذات فتحة للأنبوب إذا تم إعطاؤها لك.
- إذا لم يكن الأمر كذلك - يمكن استخدام ضمادة رفيعة لتغطية المنطقة لمنع التسرب. لا ينصح باستخدام ضمادة سميكة للغاية.
- يجب تغيير الضمادة كل يوم أو عند وجود تسرب من الضمادة أو بناء على توصية من الممرضة / الطبيب


ذا كانت لديك أية مخاوف أو شكوك ،  
فيوصى بالاتصال بالممرض / الطبيب  
للحصول على المشورة

## الخطوة الثانية : العلاج



- بعد تنظيف المنطقة حول أنبوب التغذية ، ضع Flaminal Forte / Hydro حول الأنبوب في طبقة سميكة ، حوالي 0.5 سم حول الأنبوب.
- يجب تجديد وضع فلامينال كل يوم.
- يمكنك وضع Flaminal مباشرة من الأنبوبة
- أو استخدام موصل إذا كان لديك واحد متوفر.
- يجب تجنب الاتصال المباشر بين الأنبوب القابل للاشتعال أو الموصل مع الأنبوب

## الخطوة الأولى: التنظيف

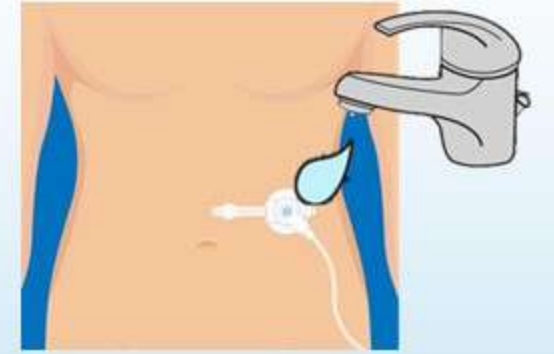

- قبل تطبيق Flaminal Forte / Hydro ، اغسل يديك وجفّفهما.
- يجب تنظيف المنطقة المحيطة بالأنبوب التغذية بالماء النظيف أو كما يوصي أحد أعضاء الطاقم الطبي.
- في حالة وجود أي بقايا من الاستخدام السابق ، والتي لم يتم غسلها بسهولة ، يمكن تركها في منطقة الأنبوب.

ملاحظة: يجب استخدام Flaminal® Hydro في حالة وجود القليل من الإفرازات أو عدم وجود إفرازات على الإطلاق. يجب استخدام Flaminal Forte في حالات الإفرازات المعتدلة إلى العالية.

1. עלון לצרכן פלאמינל פורטה ופלאמינל הידח, כפי שאושר ע"י משרד הבריאות
2. Use of Flaminal® (enzyme alginogel®) as a treatment for gastrostomy related stoma complications. P. Borg, et al. NHS , Poster ID 2048724

